

『Q.C.M.リテーナーワイヤ』の取り扱い上の注意点

【お手入れ方法について】

- ① 簡単な汚れは、流水を使って指でこするだけで落とせます。毎日流水で汚れを洗い流し、いつも清潔にするように患者さんへご説明ください。
- ② 「患者さんへのお願い」*1 を必ず患者さんへお渡しください。
- ③ 酒精綿(アルコール)で拭かないでください。
- ④ お湯(熱湯)での洗浄、煮沸消毒は行わないでください。
- ⑤ どうしても汚れが落ちにくい場合は、洗浄剤や義歯用洗浄剤*2 をご使用ください。

【作製・調整時の注意点について】

- ⑥ プラスチック部にレジンモノマーが触れないようにしてください。
- ⑦ アルカリ性の電界研磨溶液は使用しないでください。
- ⑧ プラスチック部は出来るだけ化学薬品との接触を避けてください。
- ⑨ 調整の際にプラスチック部をプライヤーで曲げたり把持しないでください。

*1 Q.C.M.リテーナーワイヤのお手入れ方法について記載しております。

お手元がない場合は、リテーナーの作製先か下記までお問い合わせください。

*2 使用できる洗浄剤と使用できない洗浄剤があります。

【使用できる洗浄剤】

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ○リテーナークリーナー……(株)ジーシー | ○リテーナーシャイン……ライオン歯科材(株) |
| ○リテーナーブライト……(株)オーラルケア | ○市販の入れ歯洗浄剤……アース製薬(株)、小林製薬(株)等 |

【使用出来ない洗浄剤】 強アルカリ性(ph12 以上)の洗浄剤はご使用できません

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ○デントクリーン………亀水化学工業(株) | ○ラバラックD………サンデンタル(株) |
|----------------------|---------------------|

【お問い合わせ先】

チカミミルテック株式会社 TEL : 088-822-1181