


Type W/交換式リテーナーワイヤ



Q.C.M. リテーナーワイヤ W はプラスチック唇側線と金属線部分がネジでつながっています。

万が一、唇側線が汚れたときも、壊れたときも、床の部分はそのまま、簡単に取り替えることができます。

Quick
Change
Method

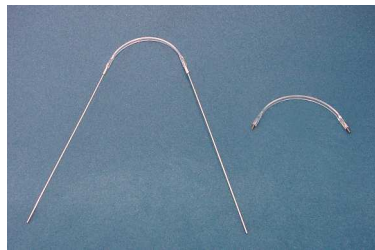

製品仕様 現在サイズは 50mm 1種類です


RWL/S W50	1 パック 5 本入り
RWL/S W50	1 パック 10 本入り
交換用 PLB	1 パック 5 本入り

プラスチック唇側線の交換方法

歯石や茶しぶによる汚れが気になる！
不注意で壊してしまった！




ネジを外して
唇側線部分を取り除く

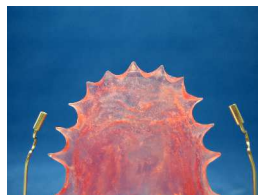

新しい唇側線
を取り付ける



できあがり！！

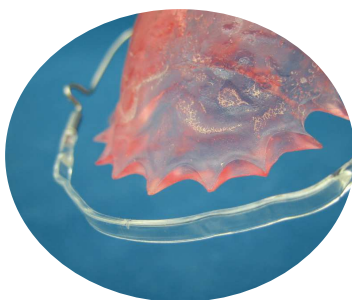

ドライヤーで熱をかけて歯に沿わせ



模型に付けて

